

Prise en main du Bladder Scanner Vitascan



Sur l'écran d'accueil :

- Appuyez sur l'option **Femme** ou **Homme**
- Pour la **femme**, appuyez sur **Hystérectomie** si nécessaire
- Appuyez sur l'option **Profondeur** :
 - **10** pour une personne ayant une corpulence maigre
 - **16** pour une personne ayant une corpulence normale
 - **23** pour une personne en surpoids
- Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la prévisualisation et localiser la vessie
- Appuyez sur **Redémarrer** pour lancer une nouvelle analyse
- Appuyez sur **Configuration** pour accéder au menu de configuration

Sur le menu configuration :



- Appuyez sur **H: M: S** pour basculer entre Heures - Minutes - Secondes. Modifiez le paramètre par - ou +
- Appuyez sur **Y-M-D** pour basculer entre Années - Mois - Jours. Modifiez le paramètre par - ou +
- Appuyez sur **"12"** ou **"24"** pour définir un nombre de coupes dans un balayage.
- **Mode facile** (basculer entre **Oui** ou **Non**) pour définir une seule tranche dans une analyse.
- Appuyez sur **Mise à jour en Direct** pour visualiser le volume de la vessie en continu en pré-scan. (Uniquement en mode facile)
- **Fantôme** (basculer entre **Oui** ou **Non**) pour mesurer le fantôme de la vessie Vitascan.

Positionnement de la Sonde :

- Mettre une bonne quantité de gel avant de prendre la mesure
- La tête de la sonde doit être placée à 4 cm au-dessus de l'os pubien dans un angle d'environ 40°
- Appuyez sur **Démarrer** pour lancer la prévisualisation



- Appuyez sur **Balayage** pour lancer le balayage de toute la vessie.
- Appuyez sur **Redémarrer** pour arrêter le pré-scan.
- Appuyez sur l'icône  pour coloriser la zone détectée.

Remarque : Pendant le **Balayage**, évitez de modifier la position, l'angle ou la pression.


Sur l'écran du résultat :



- Appuyez sur **Démarrer** pour effectuer un nouveau scan
- Appuyez sur **Effacer/Redémarrer** pour effacer l'écran
- Appuyez sur **Imprimer** pour imprimer le résultat
- Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le résultat sur une clé USB. (Uniquement activé lorsque la clé USB est connectée)
- Appuyez sur **Ajuster** pour ajuster le résultat. (Un réglage peut être nécessaire si le bord de la vessie n'est pas détecté correctement)

Remarque : Vérifiez que le curseur Jaune soit au centre de la cible.

Ajuster le résultat :

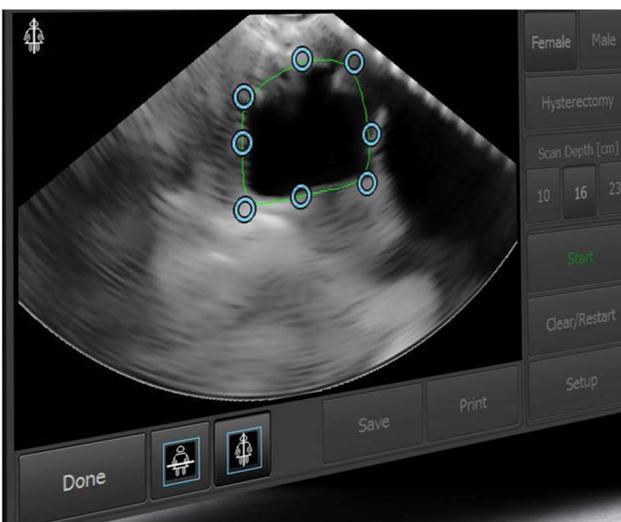

- Appuyez sur pour ajuster  le plan horizontal. (Déplacez les points marqueurs bleus vers le bord de la vessie)
- Appuyez sur pour ajuster  le plan vertical. (Déplacez les points marqueurs bleus vers le bord de la vessie)
- Appuyez sur **Terminé** pour terminer le réglage