

# PadScan HD5 Manuel Rapide d'utilisation

1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt



2 Appuyez sur la touche **Patient** pour sélectionner le sexe

a) Sélectionnez le genre via les icones suivantes



Sélectionnez  pour les enfants de taille inférieure à 120cm et de poids inférieur 25kg



Pour Femme avec Hystérectomie

Appuyer sur **OK** pour valider

3 Préparez le Patient

- a) Mettre le patient en position allongée
- b) Mettre du gel (**soyez généreux**) sur l'abdomen  
Du patient approximativement 3 cm au-dessus  
de l'os pubien.



4 Placez la sonde sur le gel avec

le bouton de scan vers la Tête du patient



Bouton

5 Ciblez la vessie avec un pré-scan

- a) Appuyez sur le bouton de la sonde pour localiser la vessie
- b) Exercez une légère pression sur l'abdomen
- c) Inclinez légèrement la sonde vers le coccyx du patient  
pour éviter l'os pubien




# PadScan HD5 Manuel Rapide d'utilisation

## 6 Appuyez une seconde fois sur le bouton SCAN


### a) NE PAS BOUGER LA SONDÉ PENDANT LA MESURE

Un bip sonore vous indiquera la fin de la mesure et le volume mesuré s'affichera sur l'écran


### b) En mode **Expert** une ligne verte verticale vous aidera pour le centrage.

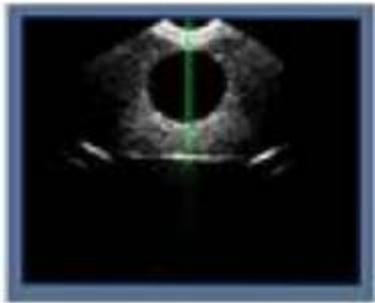


Ligne verte bonne position

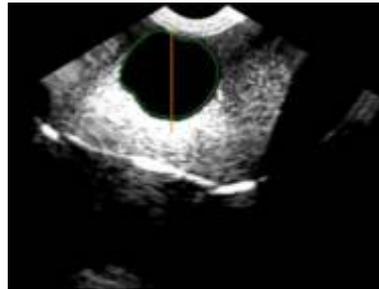

Ligne orange mauvaise position

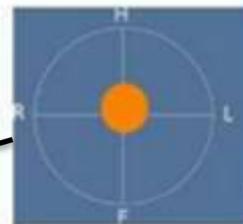

Bon positionnement

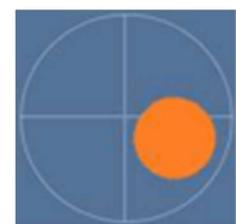

Mauvais positionnement

### c) Le mode **FACILE** fournit des indications pour aider à trouver l'emplacement exact de la vessie

A: Viseur/Cible

B: Positionnement de la Vessie



## 7 Fin d'examen

Quand l'examen est fini, nettoyer la sonde et retirer le gel du patient